

QuickTalker FT23 στην Εκπαίδευση. Από τη Θεωρία στην Πράξη

Παρουσίαση : ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΠΕ86

ΕΕΕΕΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Μπροστινή όψη



Πίσω όψη



Τι είναι το QuickTalker FT23

Το QuickTalker FT23 είναι μια φορητή, απλή στη χρήση συσκευή επικοινωνίας που έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίζει άτομα με μειωμένη ή μηδενική φωνητική ικανότητα. Ανήκει στην κατηγορία των συστημάτων εναλλακτικής και υποστηρικτικής επικοινωνίας, προσφέροντας στους χρήστες τη δυνατότητα να εκφράζονται μέσω προ-ηχογραφημένων φράσεων και λέξεων. Ουσιαστικά, είναι ένα μέσο που αντικαθιστά ή υποστηρίζει τον προφορικό λόγο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Δυνατότητες Αποθήκευσης

Εσωτερικά, η συσκευή υποστηρίζει έως και 5 επίπεδα (levels) με δυνατότητα αποθήκευσης πάνω από 100 μηνύματα συνολικά, ενώ η εγγραφή γίνεται άμεσα, χωρίς ανάγκη σύνδεσης με υπολογιστή. Ο ήχος έχει ψηφιακή ποιότητα, ενώ η συνολική διάρκεια ηχογραφήσεων μπορεί να φτάσει τα 18 λεπτά.



Το QuickTalker FT 23 έχει σχεδιαστεί με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινής επικοινωνίας για άτομα που δυσκολεύονται να εκφραστούν προφορικά. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιβάλλοντα όπως σχολικές αίθουσες, θεραπευτικά κέντρα ή και στο σπίτι, όπου η ανάγκη για άμεση, απλή και λειτουργική επικοινωνία είναι επιτακτική.

Η χρήση του είναι διαισθητική και προσαρμόσιμη, καθώς κάθε κουμπί αντιστοιχεί σε μία ηχογραφημένη φράση που μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί από εκπαιδευτικούς, θεραπευτές ή γονείς. Τα μηνύματα μπορούν να οργανωθούν θεματικά ή λειτουργικά, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη και το περιβάλλον χρήσης.



Παραδείγματα βασικών φράσεων για το σχολικό περιβάλλον

Καθημερινές ανάγκες:



Παραδείγματα βασικών φράσεων για το σχολικό περιβάλλον

Καθημερινές ανάγκες:

- «Θέλω να φάω»

Παραδείγματα βασικών φράσεων για το σχολικό περιβάλλον

Καθημερινές ανάγκες:

- «Θέλω να φάω»
- «Θέλω να πιώ νερό»

Παραδείγματα βασικών φράσεων για το σχολικό περιβάλλον

Καθημερινές ανάγκες:

- «Θέλω να φάω»
- «Θέλω να πιώ νερό»
- «Θέλω να πάω τουαλέτα»

Παραδείγματα βασικών φράσεων για το σχολικό περιβάλλον

Καθημερινές ανάγκες:

- «Θέλω να φάω»
- «Θέλω να πιώ νερό»
- «Θέλω να πάω τουαλέτα»
- «Θέλω να πλύνω τα δόντια μου»

Παραδείγματα βασικών φράσεων για το σχολικό περιβάλλον

Σχολικές δραστηριότητες:



Παραδείγματα βασικών φράσεων για το σχολικό περιβάλλον

Σχολικές δραστηριότητες:

- «Θέλω να πάμε στην αίθουσα των υπολογιστών»

Παραδείγματα βασικών φράσεων για το σχολικό περιβάλλον

Σχολικές δραστηριότητες:

- «Θέλω να πάμε στην αίθουσα των υπολογιστών»
- «Θέλω να πάμε στην αίθουσα με τον διαδραστικό πίνακα»

Παραδείγματα βασικών φράσεων για το σχολικό περιβάλλον

Σχολικές δραστηριότητες:

- «Θέλω να πάμε στην αίθουσα των υπολογιστών»
- «Θέλω να πάμε στην αίθουσα με τον διαδραστικό πίνακα»
- «Θέλω να ακούσουμε μουσική»



Παραδείγματα βασικών φράσεων για το σχολικό περιβάλλον

Σχολικές δραστηριότητες:

- «Θέλω να πάμε στην αίθουσα των υπολογιστών»
- «Θέλω να πάμε στην αίθουσα με τον διαδραστικό πίνακα»
- «Θέλω να ακούσουμε μουσική»
- «Θέλω να δούμε βίντεο»



Βήμα-βήμα η Ηχογράφηση στο QuickTalker FT23

Η ηχογράφηση στο QuickTalker FT 23
είναι πολύ εύκολη.



Βήμα-βήμα η Ηχογράφηση στο QuickTalker FT23

- 1) Πατάμε το κόκκινο κουμπί “Record”
(στην πίσω πλευρά της συσκευής)
μέχρι να ανάψει η κόκκινη λυχνία
στην μπροστινή όψη. Αυτό σημαίνει
ότι η συσκευή είναι έτοιμη για
ηχογράφηση.



Βήμα-βήμα η Ηχογράφηση στο QuickTalker FT23

- 1) Πατάμε το κόκκινο κουμπί “Record”
(στην πίσω πλευρά της συσκευής)
μέχρι να ανάψει η κόκκινη λυχνία
στην μπροστινή όψη. Αυτό σημαίνει
ότι η συσκευή είναι έτοιμη για
ηχογράφηση.



Βήμα-βήμα η Ηχογράφηση στο QuickTalker FT23

- 2) Πατάμε το κουμπί στο οποίο θέλουμε να αποθηκεύσουμε τη φράση.



Βήμα-βήμα η Ηχογράφιση στο QuickTalker FT23

3) Μιλάμε και λέμε το μήνυμα



Βήμα-βήμα η Ηχογράφηση στο QuickTalker

- 4) Μόλις ξαναπατήσουμε το ίδιο κουμπί, η φράση αποθηκεύεται.



Βήμα-βήμα η Ηχογράφηση στο QuickTalker FT23

- 5) Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία μόνο για τα κουμπιά στα οποία θέλουμε να αποθηκεύσουμε κάποιο μήνυμα.



Βήμα-βήμα η Ηχογράφηση στο QuickTalker FT23

6) Όταν πατήσουμε **μία φορά** το κόκκινο κουμπί "Record", η ηχογράφηση ολοκληρώνεται και η συσκευή επιστρέφει σε κανονική λειτουργία.



ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

